

Maxi Twin

Yenilikçi çift direkli lift

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP



Mükemmel Stabilité Ve Üstün Manevra Kabiliyeti

Maxi Twin benzersiz açık, çift direkli tasarımıyla ünlü mobil bir lifttir. Bu yenilikçi çözüm ArjoHuntleigh'in bakıcılar ve hemşireler için güvenli, ergonomik çalışma rutinlerini geliştirmek ve yatağa bağımlı olan kişilerle hastalar için rahat ve güvenli transferler sağlamak için, yatağa bağımlı hasta taşımada ikiz amaçlarını yerine getirmesi için yeni olanaklar sağlamaktadır.

İkiz direkler, diğer pasif kaldırma liftlerinden ayıran cazip, modern bir açık tasarımın kalbidir. Bu yeni görünüm yatağa bağımlı hastanın transfer rutinleri sırasında bakıcı ile göz teması kurmasını sağlayan engelsiz bir görüş açısı sunar. Stabilitéyi ve ağırlık dağıtımını geliştirerek ikiz direk tasarımı ayrıca 182 kg'ye kadar hastaların kaldırılmasına olanak sağlayan güvenliği ve çalışma kolaylığını da geliştirmektedir.

Her direk ayrı bir tutamak görevi gördüğünden çift direk konsepti mükemmel manevra kabiliyetini ve kontrolü mümkün kılmaktadır. Çift direk veya kol kaldırıcının manevrası için uzunlukları boyunca herhangi bir noktadan tutulabilir ve bu da bakıcının yüksekliği ne olursa olsun optimum çalışma pozisyonuna ulaşılmasını sağlar. Hareket halindeyken, hafif ünite üstün tekerleklerin üzerinde hareket ederek yönlendirme ve konumlandırma için minimum çaba sarf edilmesini sağlar.

Kaldırıcı, mükemmel manevra kabiliyeti ve stabilitenin rakipsiz bir kombinasyonunu sunar. Kolun ve ayırıcı çubuğun bağlantı noktasındaki benzersiz sürtünme çözümü (patent bekleniyor) yatağa bağımlı hastayı askıda sabit tutarak sarkaç etkisinin veya genellikle askılı kaldırıcılarla ilgili olan sallanma ve sarsılma hareketini önlemektedir. Yalnızca *Maxi Twin*'in sunabileceği bu mükemmel stabilite transfer rutinleri sırasında yatağa bağımlı hastanın ve bakıcının konforunu ve güvenliğini artırmaktadır.



Temel Özellikler

Kaldırıcının her özelliği ve her detayı kolay çalıştırma ve erişim için optimize edilmiştir. Açık tasarım ve manevra kabiliyeti üzerine olan bu vurgu hem yatağa bağımlı hasta hem de bakıcı için birçok çekici fayda sağlamaktadır.



3 farklı halka dağıtıcı taşıma kolu seçeneğiyle, Orta DPS ve Orta Motorlu DPS, hastalara benzeri olmayan ihtiyaçları konusunda optimize edilmiş çözümler sunmak için bir dizi seçenek mevcuttur. Sipariş anında belirtilmelidir.



Motorlu DPS taşıma kolu bir düğmeye basarak yatağa bağımlı hastanın çabasıyla, tam konumlandırılmasını sağlar.



Hem yatağa bağımlı hastanın hem de bakıcının ekstra konforu ve güvenliği için benzersiz sürtünme çözümü taşıma kolunun geriye ve ileriye sallanmasını önlemektedir.



Çift direkli tasarım yatağa bağımlı hastanın ve kaldırıcının ağırlığını dengeli bir şekilde dağıtarak döndürmeyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca her boydaki bakıcının etkili bir şekilde kullanabildiği mükemmel manevra için ergonomik bir kavrama da sunmaktadır.



Dikey elektronik tartı isteğe bağlı bir ekstra olarak sunulur. Bakıcının transfer işlemi sırasında yatağa bağımlı hastasını uygun bir şekilde tartmasına olanak sağlar.



Açık tasarım ayrıca bakıcı ve yatağa bağımlı hasta arasında her zaman yakın göz teması sağlamaya olanak tanır.



Maxi Twin mükemmel bir şekilde zeminden kolay ve güvenli kaldırma sunar.



Mükemmel ayak koyma yerleri hastanın rahatını ve güvenliğini arttırmaktadır.

Sorunsuz Ve Güvenli Transferler

Maxi Twin'in yenilikçi açık tasarımı, yerleşik geçiş rutinlerinin sağlam ergonomik çalışma yöntemlerini kullanarak tek bir bakıcı tarafından sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bakıcı için yatağa bağımlı hastayı yataktan, koltuktan veya zeminden kaldırmak kolay hale gelecektir.

Yatak kenarı rutinleri

İki direği veya kolu tutarak kaldırmayı transfer pozisyonuna getirmek kolaydır. Askı bağlantısı basit ve etkilidir. El kumandası, kaldırma işlemi sırasında bakıcının yatağa bağımlı hastaya yakın kalmasını sağlar. Kola mükemmel erişim yatağa bağlı hastanın yatağın ortasından kaldırılmasını sağlar. Kaldırma eyleminde yatağa bağımlı hasta kaldırma sırasında yataktan kaldırılırken hiçbir rahatsızlık hissetmez. Ve, görüntüyü engelleyecek merkezi bir direğin olmadığı açık tasarım kaldırma ve transfer sırasında bakıcı ile yatağa bağımlı hasta arasında her zaman yakın göz teması sağlanmasına olanak tanır.

Sandalye/tuvalet transferleri

Yatağa bağımlı hastaların sandalyelere veya tuvaletlere veya bu noktalardan sorunsuz bir şekilde transferine olanak tanır. Taşıma kolu ve kaldırıcının uzun mesafesi yatağa bağlı hastanın doğru pozisyona güvenle döndürülmesine olanak tanır. El kumandasındaki düğmeye basıldığında elektrikle çalışan şasi ayakları sandalyeye optimum erişim sağlamak için açılabilir. Her bir şasi ayağı bağımsız çalışır bu yüzden bir ayak duvar veya yatak gibi bir engelle karşılaştığında durur ve bu sırada diğeri açılmaya devam ederek mükemmel en iyi erişim sağlanır. DPS veya Motorlu DPS konforu optimize etmek ve hastayı dik konuma getirmek için yatağa bağımlı hastanın sandalyeye veya tuvalete indirilmesi sırasında konumunun hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Şasinin arkası bakıcıya kaldırıcıyı manevra ettirirken rahat ayak yerleşimi için bol bol alan sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Sistem entegrasyonu

Kaldırıcı *Carendo* gibi yaşlı bakımında kullanılan diğer ArjoHuntleigh çözümleriyle uyumlu olduğu için sistem entegrasyonu başka bir önemli faydadır. *Carendo* çok amaçlı hijyen sandalyesiyle sorunsuz entegrasyon yatağa bağımlı hastanın hijyen rutinleri için etkili ve güvenli bir şekilde transfer edilebileceği anlamına gelmektedir.



Sandalyeden ve sandalyeye transferler



Kolay yatak kenarı rutinleri



Zeminden güvenli kaldırma



Güvenli tuvalet transferleri

Zahmetsiz Konumlandırma Ve Geliştirilmiş Bakım

Maxi Twin kullanarak yatağa bağımlı hastanın taşınma rutinlerini geliştirebilirsiniz. Personel, yatağa bağımlı hastanın kaldırılmasında, konumlandırılmasında ve pozisyon verilmesinde maksimum fayda elde etmektedir. Yatağa bağımlı hastaların tüm kaldırma işlemleri el kumandasıyla kontrol edilmektedir. Askıda yatağa bağımlı hastanın konumlandırılması DPS (Dinamik Pozisyonlama Sistemi) veya Elektrikli DPS kullanılarak minimum veya hiç çaba gösterilmeden gerçekleştirilebilir. Yatağa bağımlı hasta askıda 360 derece döndürülebilir ve bu da transfer rutinlerinin etkililiğini artırmaktadır.

Mükemmel kaldırma aralığı ve ulaşım yatağa bağımlı hasta transferleri için taşıma faydaları sağlamaktadır. Herhangi türden bir yataktan - sabit yükseklikte, yüksekliği ayarlanabilir, ekstra

geniş - ortasına düzgün bir şekilde konumlandırılabilirdiğinde yatağa bağımlı bir hastanın manuel yeniden konumlandırmaya ihtiyacı olmaz.


Kendilerini destekleme kapasitesi olmayan yatağa bağımlılar ve hastalarda yalnızca bir hemşirenin veya bakıcının kullanımı gerektiren durumlar için tasarlanmıştır - Arka sayfadaki Mobility Gallery'ye bakın - Huzurevi, bakım evleri ve hastaneler gibi bakım ortamları için uygundur.

Maxi Twin günlük transferler sırasında güvenliği, konforu ve acil bir durum meydana geldiğinde hastayı zeminden acil kaldırmayı geliştirerek, hemşireler ve bakıcılar ile yatağa bağımlı hastalar ve diğer hastalar için çalışma koşullarını iyileştirmektedir.



Ürün teknik özellikleri

Alan gerekliliği

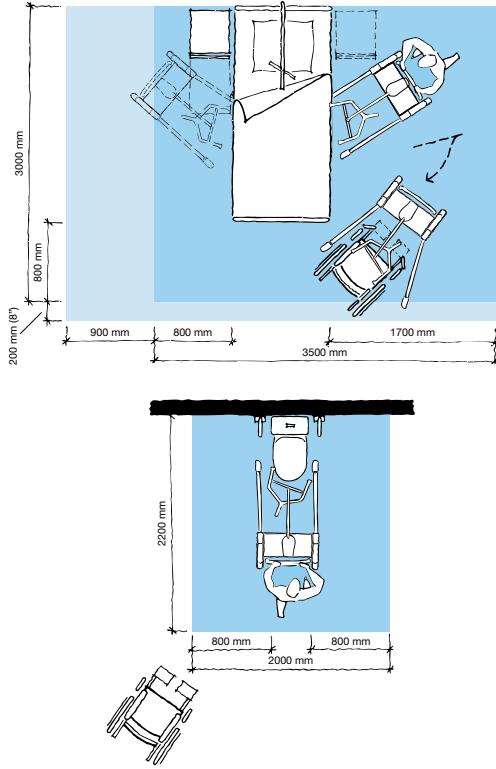

Mavi alan, personelin mekanik yardımcılarla bir yandan ergonomik bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli minimum çalışma alanını göstermektedir.

Açık mavi alan, yatağa bağımlı hastaya, mekanik yardıma ve yardımcı bakıcıya yeterli erişimi sağlamak için her iki tarafın eylemlerini kolaylaştırmak için çalışma alanının ne kadar genişletilmesi gerektiğini göstermektedir.

Mobility Gallery™

Yaşlı Bakımı



DORIS

EMMA

DORIS

EMMA

Özel Bakım

D, kendini destekleyemiyor.

E, neredeyse tamamen yataklak ve tamamen yatağa bağımlı.

Mobility Gallery™ hakkında daha fazla bilgi için lütfen ArjoHuntleigh ile iletişime geçin.

Ürün bilgileri

Maks. güvenli çalışma yükü	182 kg
Ağırlık (ayırıcı çubuk yok, batarya yok) (kaps. DPS + batarya)	45,5 kg 53,7 kg
Kaldırma hareketi	1225 mm
Maks. kaldırma yüksekliği (CSP*) (Tartı ile)	1985 mm 2150 mm
Min. kaldırma yüksekliği (CSP*) (Tartı ile)	760 mm 880 mm
Min. toplam saklama yüksekliği (Tartı ile)	1480 mm
Şasi açıklığı (zeminden şasinin altına)	30 mm
Ayak açıklığı (zeminden ayakların üstüne)	115 mm
Harici genişlik ayakları (kapalı) (açık)	755 mm 1370 mm
Dönme çapı	1445 mm
Toplam uzunluk	1300 mm
Lift - Koruma Sınıfı	IPX4
Batarya	2.5 NiMH; ArjoHuntleigh NEA0100
Acil durdurma ve sistem arızası geçersiz kılma	

Bir engele indirilirse otomatik durma

Düşük sürtünmeli tekerlekler, arka ikisinde fren var

Ürün mevcut mevzuata ve uygulanabilir
ürün standartlarına uygundur

* ISO 10535 uyarınca: Merkezi Süspansiyon Noktası

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 Malmö, Sweden
Telefon: +46 (0) 10 335 45 00

ArjoHuntleigh Türkiye
Büyükhaneli Plaza Küçükbakkalköy Mahallesi
Defne Sokak NO:3 Kat:8
34750 Ataşehir/İstanbul/TÜRKİYE
Phone: +90 216 444 66 78
Fax: +90 216 410 28 15
Email: info.trist@getinge.com

www.arjohuntleigh.com